


耳かけ型充電式集音器 楽ちゃんヒアリング SK-05

取扱説明書

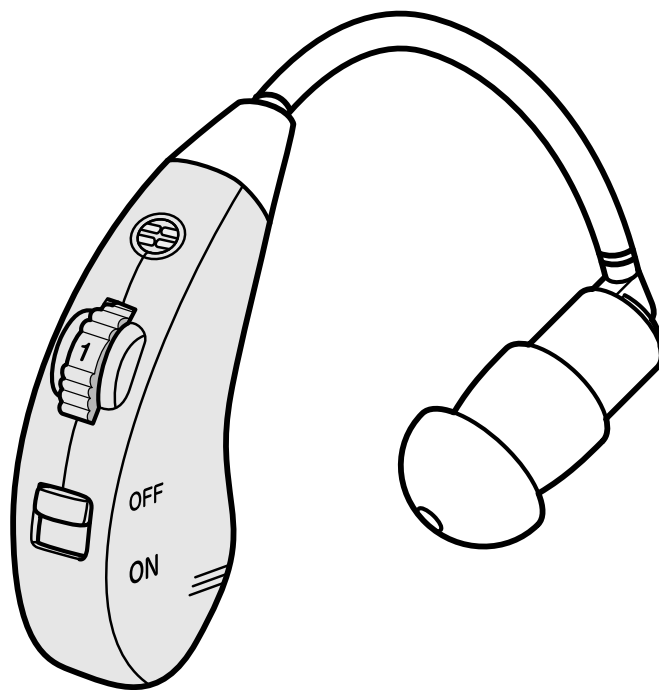

本製品は集音器です。医療機器の補聴器ではありません。


重要

ご使用になる際は、短時間から徐々に耳を慣らしていくことをおすすめしています。


耳や体に不調を起こさないために、最初は無理をせず短い時間から無理のない音量でご使用ください。

商品を使うために、集音器を充電する

1 充電台とUSBケーブル・充電アダプターをセットします。

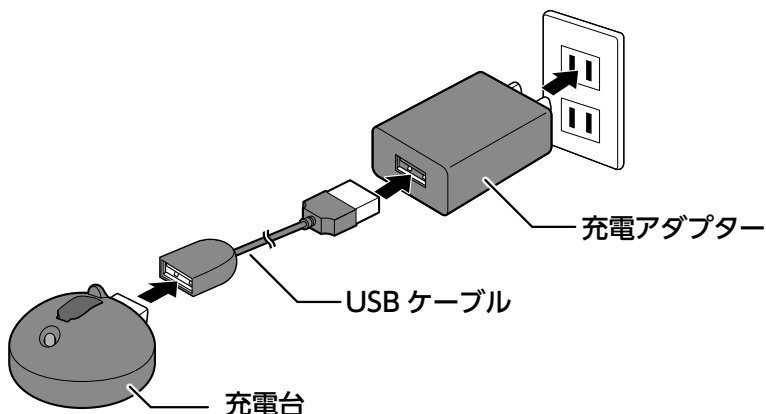


2 集音器の電源をオフにします。

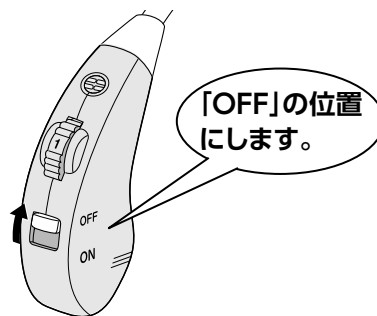

重要

電源がオンのままだと充電できませんのでご注意ください。

3 集音器を充電台に真っすぐさし込みます。

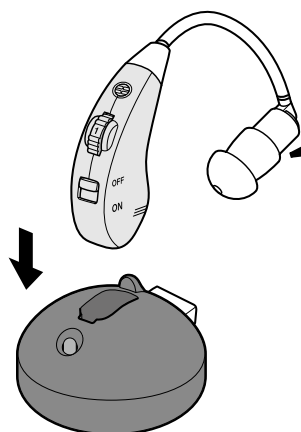

重要

集音器は正しくセットしないと充電できません




集音器を奥までしっかりさし込んでください。



反対向きにささないでください。逆だと入りません。

充電中は充電ランプが赤色に点灯します。

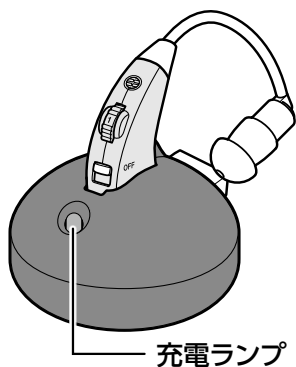

● 赤色 充電中

○ 緑色 充電完了

充電目安時間：10時間


充電について

- 充電には約 10 時間かかります。(10 時間経つ前でも充電ランプが緑になったら充電完了です)
- 充電ランプは、赤にも緑にも点灯してない場合は、充電ができていません。
- 充電できない場合は、集音器の電源がオフになっているか、集音器の向きが正しくセットされているか確認してください。
- 充電台をコンセントに繋げた瞬間は、ランプが点滅しますが、故障ではありません。
- 電池を使い切ってから充電した方が電池が長持ちします。
- 満充電すると、約 30 時間使用できます。
- しばらく使用しないときは、電池の性能低下を防ぐため6か月に一度は充電してください。


充電が終わったら、充電台から外す



集音器を持って外す

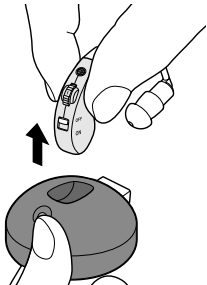

イヤークューブは持たない

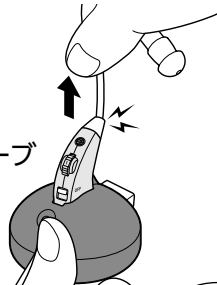


充電台から外すときは、イヤークューブではなく必ず集音器を持って外してください。

断線の原因になります。

充電終了後は、コンセントから充電アダプターも外してください。

耳に装着して、使用する


1 電源をオンにします。

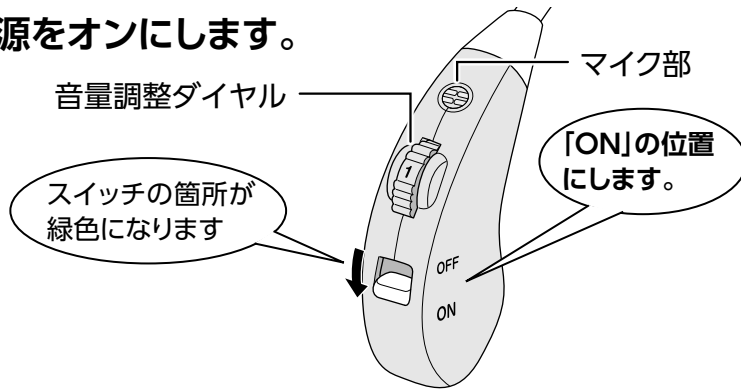

👉ポイント

音量が大きいと、ピーとハウリングしてしまうので、音量は1にして装着してください。

2 集音器を耳に装着します。(イラストは左耳用です)

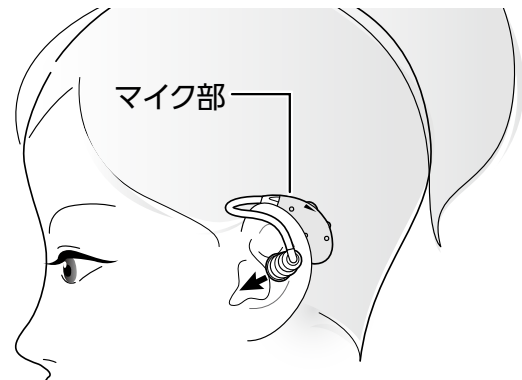

① 集音器 (固い部分) を耳のラインに沿わせて顔側から耳にかけます。

髪の毛が長い方は、髪の上から乗せず、顔側から耳の上に這わせるように装着してください。

② 集音器を耳にぴったり装着できたら、イヤークリップを奥まで耳に入れます。

👉ポイント

- イヤークリップと耳穴の間にすき間ができないサイズを選んでしっかりつけ、耳の奥まで入れてください。
- 雑音が入る場合がありますので、なるべくマイク部に髪がかからないようにしてください。
- 鏡を見ながら行くと装着しやすくなります。


ピー音 (ハウリング) がしたときの対処法

ハウリングは、増幅した音をマイクで拾ってしまい、音がループしてしまっている現象です。


ハウリングした場合は、下記を確認してください。

- 大きめのイヤークリップに変えて、耳穴とイヤークリップのすき間をなくす
- 指や髪で、マイク部を塞がないようにする


メガネと併用いただくときの装着方法

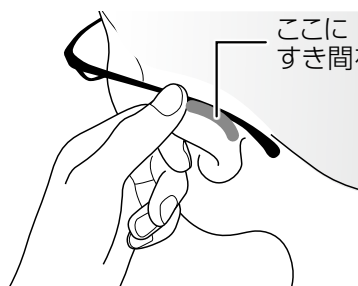

耳を顔側に少し倒して、耳とメガネのフレームの間にすき間をつくります。

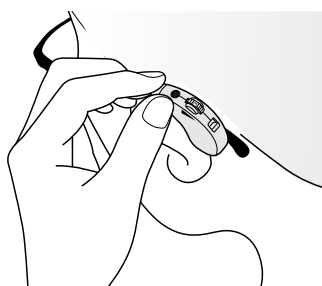

耳とメガネのフレームのすき間に、集音器 (固い部分) を沿わせて入れます。

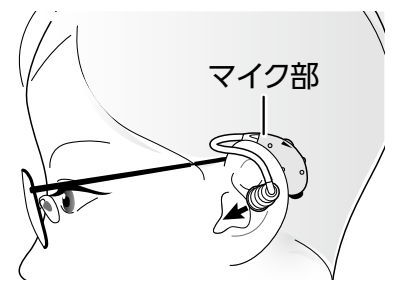


集音器を耳にぴったり装着できたら、イヤークリップを耳に入れます。

👉ポイント

装着しづらい場合は、いったんメガネを外し、集音器を装着してから、あらためてメガネをかけてください。


聞こえやすい音量に調整する

1 装着している側の手で、人差し指・中指・薬指で耳から落ちないように押さえます。

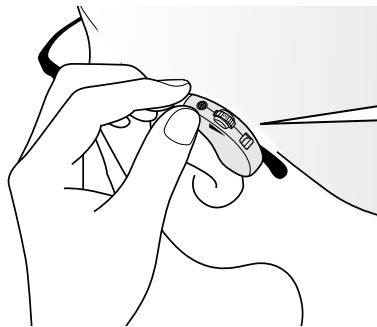


2 親指で音量調整ダイヤルを回して音量を調整します。

音量は 4 段階で調節できます。

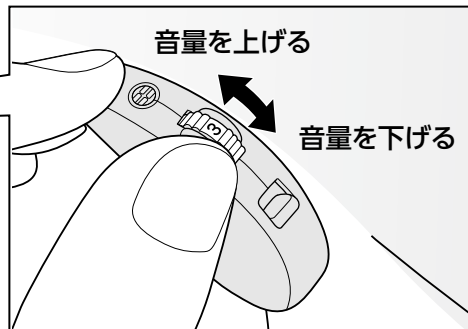

ご使用後は、集音器を耳から外し電源をオフにする

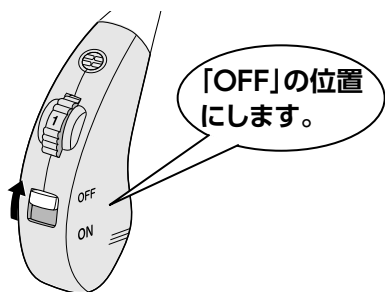


お願い 使用していないときは必ず電源を OFF (オフ) にしてから保管してください。
電源が ON (オン) のままだと放電し不具合の原因になります。

● しばらく使わないときは、よく掃除してから冷暗所に保管してください。

イヤークラスの大きさを交換する


● イヤークラスの外し方

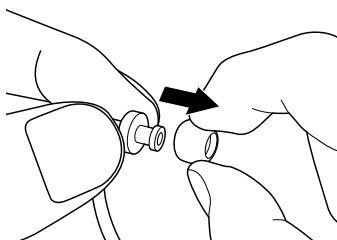

片手で集音器を持ち、もう一方の手でイヤークラスの先端をつまみ、引っぱって外します。

警告
イヤークラスを持って外さない。

● イヤークラスの付け方

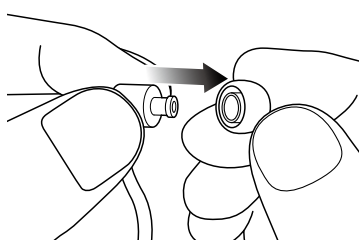

集音器をイヤークラスの裏側の穴に押し込むように入れて、取り付けます。



お手入れをする

● イヤークラス・イヤークラス

ときどきイヤークラスを外して付属のお掃除ブラシで掃除します。


耳垢などのゴミで音口部が詰まらないように定期的に掃除してください。ゴミが詰まると音が聞こえにくくなる場合があります。

開口部はお掃除ピンで、周囲はブラシで掃除します。

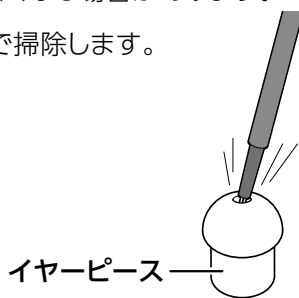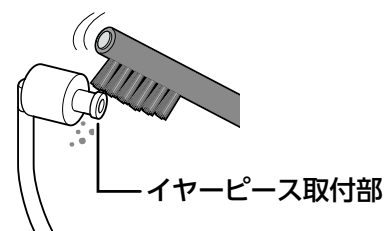

● 集音器・充電台の充電端子

乾燥した綿棒で汚れをやさしく取り除いてください。充電端子が汚れていると接触不良で充電できなくなる場合があります。

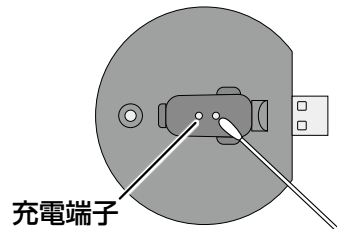

● 集音器

乾燥した清潔な布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたものを含ませた後、かたく絞った布で拭いてください。

故障かなと思ったらこちらをご確認ください


症状	対処方法		ページ数
ピー音（ハウリング）がする	大きいイヤークラスに交換する。	装着後、イヤークラスと耳穴の間にすき間ができると、漏れた音をマイクが拾ってしまいます。 すき間ができないように、耳穴が塞がる大きめのイヤークラスに交換してください。また、イヤークラスの角度を変えて耳の奥までしっかり入るようにしてください。	4 ページ
	手や髪の毛、電話の受話器で耳を覆わない。	手や髪の毛、電話の受話器で耳を覆ってしまうと、狭い空間で音が回るため、マイクが音を拾いやすくなります。 手や髪の毛で耳を覆わず、受話器は耳から少し離してください。	—
	音量を小さくする。	スピーカーが出力した音が大きいと、マイクが音を拾いやすくなります。	4 ページ
	耳垢を掃除する。	耳垢が詰まっていると、音が鼓膜まで届かず跳ね返されるため、マイクが音を拾ってしまいます。	—
充電ができない（充電ランプがつかない）	集音器が正しい向きで充電台にさしこまれているか確認する。	集音器の電源スイッチを充電台の充電ランプ側に向けてさし込んでください。逆の向きでは充電されません。	2 ページ
	集音器の電源をオフにする。	集音器の電源をオフしてから充電台にさし込んでください。電源がオンになっていると充電されません。	2 ページ
	USB ケーブルが断線してないか確認する。	充電台と USB ケーブル・充電アダプターをセットした状態で充電できない場合、USB ケーブルの内部の電線が切れている可能性があります。 充電台を充電アダプターに直接さし込んだ状態で充電できるか確認してください。	—
	集音器と充電台の充電端子を掃除する。	本製品は、集音器底部の充電端子と充電台の充電端子が接触することで充電される仕組みです。充電端子が汚れていると、充電できない可能性があります。 汚れやゴミが入っていたら、取り除いてから充電するようにしてください。	4 ページ
雑音がする	本製品には雑音を軽減する機能は備わっていますが、すべての雑音を消すことはできません。 集音器などの聴覚サポート機器を初めて使用したときは、雑音や生活音を「うるさい」と感じる人が多いです。これは、急に音が聞こえるようになったことで、聞こえない環境に慣れていた脳が必要な音と不必要な音を判別できないためです。 使い続けることで脳が慣れるため、毎日少しずつ使うことをおすすめしています。		—


安全にお使いいただくために


ご使用になるお客様や他の人が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。ご使用前に次の内容をよくお読みいただいた上、正しくお使いください。


誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明します。

〈表示の説明〉

 **警告** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

 **注意** 「人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される」内容

 してはいけない「禁止」内容です。

 実行しなければいけない「指示」内容です。

■ 集音器の取り扱いについて



警告



次のような症状が表れたときは、集音器の使用を中止し、すぐに医師に相談する。

症状が悪化する原因になります。

- 耳を治療中、もしくは治療が必要になったとき
- 耳の中に痛みがある場合
- 先天的または外傷による明らかな耳の変形がある場合
- 急激または急速な難聴の進行が生じた経験がある場合
- 急性または慢性的めまいがある場合
- 耳垢、または異物の集積が明らかな場合
- 耳漏が生じたとき、もしくは耳漏を生じた経験がある場合

- 耳の皮膚が赤くなったり、かゆみ、湿疹が生じたとき
- 耳の間こえが急に悪くなったと思えるとき
- 本製品の的外観、音質、音量等に異常を感じたとき
- 集音器と接する皮膚が、かぶれたり湿疹ができたりしたとき
- 使用中に耳だれが生じたり、何らかの事情で耳の治療が必要になったとき
- 以前に比べ、耳の聞こえが悪くなったとき
- めまいや吐き気、胸の痛みなど、普段と違う症状を感じたとき

警告



使用前に必ず点検をする。

破損、割れ、亀裂、不具合などがある場合は直ちに使用を中止し、カスタマーサービスにご連絡ください。そのままご使用を続けると感電・火災・ケガの原因になります。

次のような方は医師(主治医)に相談の上で使用する。場合によっては、集音器をご使用になれない場合があります。

- 耳の手術を受けたことのある方
- 耳だれのある方
- 耳垢の多い方
- 急性または慢性のめまいのある方
- 外耳道に湿疹、痛みまたは不快感のある方
- 長期にわたって継続して使用する方



使用中や使用直後は、集音器の一部が熱くなっている場合があるので、取り扱いに注意する。やけどの恐れがあります。



お客様自身による分解、改造、修理は絶対にしない。火災、ケガの原因になります。



必要以上に大きな音量で使用しない。耳を傷める原因になります。



集音器を水につけたり、ぬらさない。感電、故障、ケガの原因になります。

水ぬれ禁止

注意



使い始めは音量を小さめにしてから使用する。耳を傷める原因になります。



取扱説明書で指示されている部品(当社が推奨または販売している部品)以外は使用しない。故障やケガの原因になります。

ぶつかけたり、重いものを上に載せたり、無理な力を加えない。また、無理に部品を引っ張るなど、乱暴に扱わない。

破損し、感電・火災・事故の原因になります。

集音器を次のような場所に設置・保管しない。

感電・故障の原因になります。

- 極端に高温、低温になる場所
- 暖房器具などの熱源や火気の近く
- 浴室内など水のかかりやすい、または多湿の場所
- ホコリが多い場所
- 野外、直射日光の当たる場所
- 有害物質の近く
- 滑りやすいものの近く
(グリース、油、雪、未乾燥の塗料など)



お子様やペット(動物)の手の届かないところに保管する。思わぬ事故やケガの原因になります。



以下の場合は使用しない。思わぬ事故やケガの原因になります。

- 集音器が故障や劣化した場合
- 集音器が化学物質で腐食した場合
- 集音器が熱で変形した場合

お子様には使用させない。思わぬ事故やケガの原因になります。

他人に集音器を貸したり、他人から借りたりしない。耳を傷めたり、耳の病気が感染する原因になります。

故障していたり、故障と思われる場合は、使用しない。思わぬケガの原因になります。

就寝時には使用しない。事故や体調不良の原因になります。

監督が必要な人は使用しない。思わぬケガの原因になります。

■ 充電台、充電アダプターの取り扱いについて



警告



電源プラグをコンセントから抜く

下記のような場合は、直ちにご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、カスタマーサービスに連絡する。

そのままご使用を続けると、感電、火災、やけど、ケガ、故障の原因になります。

- 本製品が破損した場合
- 本製品に異常を感じた場合
- 使用中にごげくさい臭いや煙が出た場合
- 部品が破損または紛失した場合



電源プラグが曲がった場合は、使用を中止する。

カスタマーサービスにご連絡ください。そのままご使用を続けると感電・火災・やけどの原因になります。



AC100V 50/60Hzのコンセントに接続して使用する。故障や発熱による火災の原因になります。



タコ足配線など、コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない。発熱による火災の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜きさしたり、電源がON(オン)になった状態の集音器を触らない。感電の恐れがあります。



水場で使用禁止

浴室や湿気の多いところで充電しない。感電・故障の原因になります。

注意



電源プラグは、根元まで確実にさし込む。

不完全なさし込みのまま使用を続けると、感電・火災の原因になります。



組み立てや取り外し、または移動やお手入れをする場合、電源プラグをコンセントから抜く。ケガや火災の原因になります。

⚠ 注意



電源プラグは、定期的に乾いた布でホコリを拭き取る。
そのまま使用を続けると、火災の原因になります。



使用しないときは電源をOFF(オフ)にし、電源プラグをコンセントから抜く。
故障や思わぬ事故やケガの原因になります。



使用後は電源プラグをコンセントから抜いて保管する。

電源プラグ
をコンセント
から抜く

接続したままでは事故の原因になります。

ご使用上の注意

- 集音器のイヤータブを曲げないでください。
破損の恐れがあります。
- 本製品はおもちゃではありません。
- 本製品は、平らで乾燥した清潔な場所に保管してください。
故障の原因になります。
- 激しい運動をするときは、本製品を使用しないでください。
落とすと、破損する恐れがあります。
- 洗面所や道路などで、本製品をつけ外ししないでください。
落とすと、破損する恐れがあります。
- 汗や水で濡れたときは、乾いた布ですぐに拭いてください。
- 入浴や洗顔の際には、本製品を使用しないでください。外した後は、乾いた場所に保管し、ぬれた場所には置かないでください。
故障の原因になります。
- ヘアスプレー・香水など、気化するものと一緒に使用しないでください。
故障の原因になります。
- 本製品は清潔に保ってください。
汚れは故障の原因になります。
- お手入れには下記の溶剤や洗剤を使用しないでください。
割れや破損により、感電・火災・事故の原因になります。
 - ・ベンジン、シンナー
 - ・液体洗剤
 - ・スプレー洗剤
 - ・アルコール入り洗剤
 - ・洗濯用洗剤
 - ・漂白剤
 - ・研磨剤
 - ・腐食剤
 - ・潤滑剤

🔥 ポイント

ピー音 (ハウリング) について

ハウリングがする場合には右記を確認してください。

- 耳穴がしっかり塞がる大きめのイヤピースに交換してください。
- 音量が大きくないですか？ 音量を最小に戻してから、少しずつ音量を上げてください。
- 装着時にハウリングしてしまう場合は、装着してから、電源をオンにしてください。

保管方法

- 子どもや監督が必要な人の手の届かない、落下しにくい安全で乾燥した場所に保管してください。
- 次のような場所には保管しないでください。
 - ・極端に高温・低温になる場所
 - ・油煙や湯気のアたる場所
 - ・有害物質の近く
 - ・野外や直射日光のアたる場所
 - ・熱源器や火のそば
 - ・滑りやすいものの近く(グリース、油、雪、未乾燥の塗料など)
 - ・ほこりや湿気の多い場所
 - ・お子様、ペットの手の届く場所

仕様

本体	電源	充電式 (NiMH)	充電アダプター	入力	AC100 ~ 240V 50/60Hz
	使用時間	約 30 時間*		出力	DC5V、1.2A
	重量	5g		充電時間	約 10 時間

*初期性能は、通常の会話に使用して約 30 時間使えます。

バッテリーについて

本製品に使用しているバッテリー電池 (ニッケル水素電池) はリサイクル可能な資源です。
使用済みのバッテリー電池は、ニッケル水素電池リサイクル協力店へお持ちください。



Ni-MH

製品の廃棄に関して

廃棄の際は、廃棄する地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。



株式会社 オークローンマーケティング

〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル14F

正規輸入販売元 ショップジャパンは楽天ひアリングの正規輸入販売元です。

管理番号:RAH20180810TNET1-09